

گیگاسپت آف فورت

کنسارته ضد عفونی کننده و پاک کننده قوی ابزار و وسایل

ترکیبات:

گیگاسپت آف فورت دارای مواد موثره مختلف از خانواده های آونیم کوآترنر، گلیکول، اکلیل آمین و کوآئید هاست که در کنار یکدیگر دارای اثر هم افزایی (سینرژیست) هستند. این فرآورده همچنین دارای مواد جانبی دیگری از قبیل پاک کننده های قوی، عوامل جلوگیری کننده از ایجاد خوردگی بر سطح وسایل، حلالها، تنظیم کننده های pH و ... است.

تأثیر ضد میکروارگانیسمی :

گیگاسپت آف فورت گستره بسیار وسیعی از میکروارگانیسم ها را نابود می کند. این فرآورده بر انواع باکتری (از جمله TB)، قارچ ها و ویروس ها (HIV، HBV، HCV) موثر است. آثار ضد میکروارگانیسمی گیگاسپت آف فورت بر اساس جدیدترین استاندارد متدهای اروپا (EN) و DGHM / VAH آزمون شده است.

مورد استفاده:

گیگاسپت آف فورت برای ضد عفونی و پاک کردن انواع وسایل و ابزار جراحی حساس یا مقاوم به حرارت مناسب است. این ماده همچنین برای استفاده در سیستم های اولتراسونیک کاتلا سازگار شده و در این شکل مصرف توانایی خاصی را حتی در زمانهای بسیار کوتاهتر از خود نشان می دهد.

روش استفاده:

گیگاسپت آف فورت یک محلول کنسارته است. برای استفاده ابتدا باید محلول رقیق آن را در غلظت ۲٪ تهیه و ابزار و وسایل آلوده را در این محلول رقیق شده غوطه ور نمود. (جهت تهیه رقت ۲٪ باید ۲۰ میلی لیتر از محلول کنسارته به ۹۸۰ میلی لیتر آب پاکیزه افزوده شود). غوطه وری وسایل در این محلول بایستی بگونه ای باشد که تمامی سطوح ابزار در تماس با ماده ضد عفونی کننده قرار گیرند و از احتیاج حساب های هوا در قسمت های خالی آنها باید جلوگیری نمود. پس از طی زمان ۱۵ دقیقه برای رقت ۲٪ میتوان وسایل ضد عفونی شده را خارج کرد و آبکشی و سپس خشک و بسته بندی نمود. اکنون آنها برای طی روند استریلیزاسیون آماده هستند. شایان ذکر است که استفاده از این فرآورده لزوم و وجوب استریلیزاسیون ابزار و وسایل بحرانی (Critical) را از بین نمی برد. استفاده از گیگاسپت آف فورت در سیستم های اولتراسونیک هم امکان پذیر است، غلظت مورد استفاده در این صورت ۲٪ و زمان تماس، فقط ۵ دقیقه خواهد بود. جهت ضد عفونی کردن کلیه ابزار و وسایلی که پیش از این با فرآورده های آلدئیدی ضد عفونی می شده اند بهتر آنست که ابتدا با محلول گیگازایم شسته و پاکسازی شوند و سپس با استفاده از گیگاسپت آف فورت ضد عفونی گردند. این عمل در مورد حوضچه و وان مخصوص ضد عفونی وسایل نیز پیشنهاد می شود.

مزایا:

گیگاسپت آف فورت پس از رقیق شدن، ۷۰ روز قابلیت استفاده مکرر را حتی در محیط با بار آلودگی آلی دارد.

بسیار مقرون بصرفه است و هر بسته آن توانایی ایجاد حداقل ۱۰۰ لیتر محلول ۲٪ را دارد.

فاقد آلدئید و عوارض ناشی از آن است.

دارای رایحه دلپذیر می باشد.

طیف بسیار وسیع و قوی ضد میکروارگانیسمی را به همراه آثار عالی پاک کنندگی (لکه های خون و ...) از خود نشان می دهد.

حتی در محیط آلوده توانایی از بین بردن میکوباکتریوم را دارد (پشت سر گذاشتن آزمون های مداوم ۷ روزه).

با مواد مختلف سازگار است و باعث خرابی آنها نخواهد شد.

سازگار با طبیعت است و باعث آلودگی محیط زیست نخواهد شد.

این فرآورده بر استاندارد متدهای نوین اروپا (EN) و اصول DGHM / VAH منطبق است.

بسته بندی:

گیگاسپت آف فورت در ظروف ۱۰۰ میلی لیتری و ۲ و ۵ لیتری عرضه می شود.



در صورت نیاز پوست رنگی پروتکل مصرف فرآورده نیز قابل ارائه خواهد بود.